

# 取扱説明書

## カルイビキ

### 型番 SL-904U

Ver 2. 0 0



#### 項目

1. 内容物の確認
2. 組み立て方法
3. 使用方法
4. 仕様
5. お手入れ方法
6. 注意事項
7. 知的財産権など
8. 連絡先
9. 販売者情報

本商品カレイビキをお買い求めいただきありがとうございます。本商品は、うつぶせ寝の姿勢を維持しつづけるサポートベッドです。

## 1. 内容物の確認

以下のものが内容物として同封されています。ご確認ください。
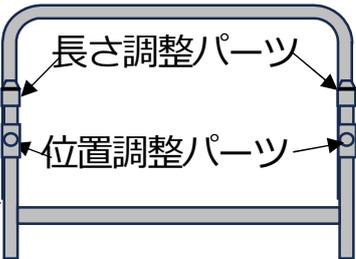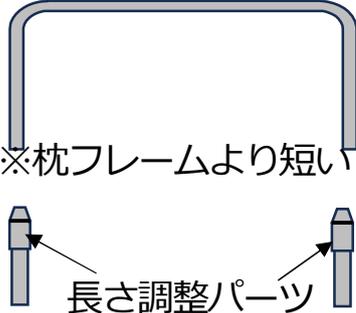
<p>枕フレーム</p> <p>メインフレーム</p> <p>※組み付いた状態 となっています。</p>	 <p>長さ調整パーツ</p> <p>位置調整パーツ</p>
<p>背当てフレーム</p>	 <p>※枕フレームより短い</p> <p>長さ調整パーツ</p>
<p>固定ネジ</p>	
<p>胸部クッション A</p>	<p>胸部クッション A (厚みが厚い)</p>
<p>胸部クッション B</p>	<p>胸部クッション B (厚みが薄い)</p>

枕クッション	枕クッション
背当てクッション	背当てクッション

必要なものがそろっていない場合は、10の問い合わせ先にご連絡ください。

## 2. 組み立て方

### 手順1

写真1を参考にメインフレームに取り付けられている2つの位置調整パーツに固定ネジをそれぞれ2つ取り付けてください。なお、スライド方向にはネジ穴が2つありますがどちらに固定ネジを取り付けても構いません。

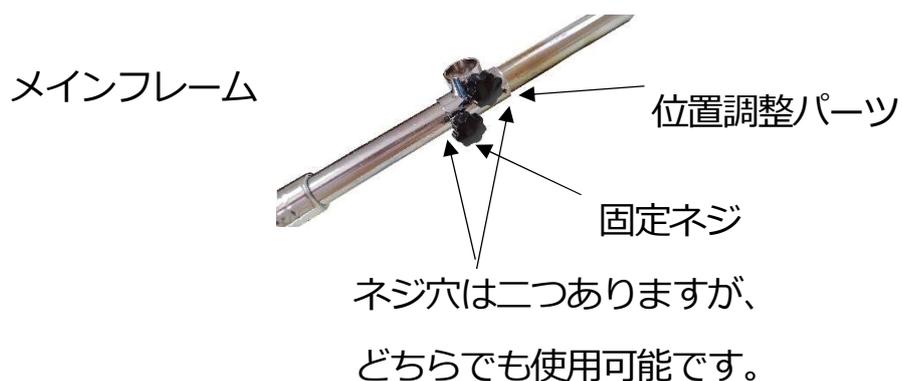


写真1



写真2

### 手順2

背当てフレームに長さ調整パーツを組み付けてください。

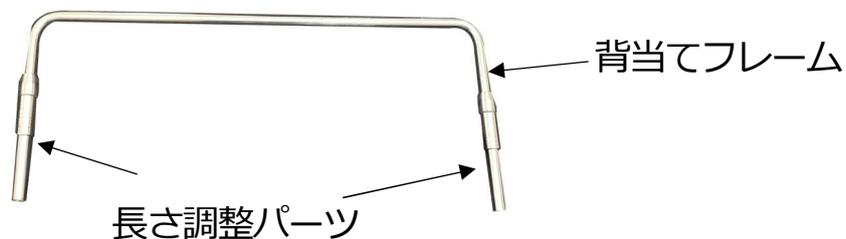


写真3

### 手順3

位置調整パーツを写真2の位置で軽く固定ネジを回して仮固定し、メインフレームの位置調整パーツに背当てフレームを挿入し、固定ネジで固定してください。

※二つの位置調整パーツの位置がずれていると、背当てフレームが挿入できません。



写真4

### 手順4

胸部クッションAの裏面のマジックテープでメインフレームに取り付けてください。



### 手順5

枕クッションを枕フレームに取り付けて下さい。



写真6

## 手順6

同様に背当てクッションを背当てフレームに取り付けてください。

### 3. 使用方法（ご使用の際は、6. 注意事項も必ずお読みください）

1. 調整パーツをゆるめ、枕クッションと胸部クッションAとの間隔を調整し、長さ調整パーツを締め固定してください。

**※締めすぎに注意ください！！ 過度に締めすぎるとゆるめられなくなる可能性があります。**

2. 調整パーツをゆるめ、背当てクッション胸部クッションAの間隔を使用者の肩幅以下に調整してください。

**※締めすぎに注意ください！！ 過度に締めすぎるとゆるめられなくなる可能性があります。**

3. 胸部クッションBを胸部クッションAの隣に配置して、胸部クッションAと背当てクッションの間に体を置いて使用してください。

（その他）

胸部クッションAの高さが高すぎる場合は、胸部クッションBと入れ替えて、胸部クッションBだけで使用ください。

**ワンポイント！！**

**※就寝中に足元方向へ体が滑ってしまう方がいらっしゃいます。足元を壁などでふさいで使用すると、より効果的にうつふせ寝を維持できます。**

※カバーはメッシュとなっています。肌触りが気になる方は別途、タオルなど肌感に合うもので覆って使用ください。

### 4. 仕様

フレーム類：ステンレス

クッション：ポリウレタン

カバー：ポリウレタン

## 5. お手入れ方法

- ・各クッションには、ファスナーがついております。ファスナーを開き、クッションを取り出してください。カバーは、洗濯表示に従って洗濯ください。
- ・フレームはステンレスです、住居用洗剤などで汚れはふき取ってください。

## 6. 注意事項

・本製品は、うつぶせ寝を保持させます。いびきの治療器具ではありません。疾病の治療器具ではありません。

- ・うつぶせ寝以外の使用はできません。
- ・首や腰痛を感じる場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- ・ベッドの取り付けの場合は、製品の落下にご注意ください。
- ・体重が90kg までです。極端に腹囲が大きい方、胸より80mm以上腹部が突出している場合、本製品によりうつぶせ寝は困難になります。その他、腹部が出ている場合、うつぶせ寝ができない場合があります。

- ・ウオーターベッドのような柔らかいマットレスには使用できません。
- ・18歳未満は使用禁止です。65歳以上の方は医師にご相談ください。
- ・本製品では胸部、腹部に体圧がかかります。病気をお持ちの場合は医師に相談ください。

- ・効果には個人差があります。いびきの原因によっては効果が望めない場合があります。
- ・息苦しさをを感じる場合は使用を中止ください。
- ・転倒の危険性があります。十分に余裕をもった場所でご使用下さい。
- ・フローリングや畳上で使用する場合は、傷を防止するためカーペットなど使用してください。

・背当てフレーム、枕フレームは過度に引き出しすぎないようにしてください。十分な固定ができず、思わぬ事故やケガの原因になります。

・枕フレームと胸部クッションの間には、タオルなどを置いて、涎などの汚れが寝具につかないように注意ください。

## 7. 知的財産権など

本製品には、特許出願がされています。類似品をお見かけの場合は、下記にご連絡ください。有力な情報には謝礼を差し上げます。

patent@icturn4.com



メールアドレスはQRコードから読み取れます。

## 8. 保証など

保証期間は、6か月になります。

納品書、レシートなどを保証書の代わりとします。

クッションの使用による劣化は保証対象外です。

クッションのみ別売り対応いたします。連絡先までお問合せください。

## 9. 連絡先

故障、修理などお問い合わせがありましたら、以下へメールください。一両日中にご連絡いたします。

support@icturn4.com



メールアドレスはQRコードから読み取れます。

## 10. 販売者情報

IC-turn 4

販売者代表 池田 充

〒915-0801 福井県越前市家久町100-3-9